

# Rollatorkorb-Abdeckung

## Bedienungsanleitung

### Schritt 1:

Die Korb-Abdeckung wird auf den Korb gelegt, sodass sich die beiden schwarzen Halterungen im oberen Bereich des Korbes befinden.

### Schritt 2:

Die Kabelbinder werden an die untere Seite der Abdeckung und um den Korb gelegt.

### Schritt 3:


Daraufhin werden die Kabelbinder am Korb befestigt. Diese sollen jeweils auf der rechten und linken Seite angebracht werden.



Korbequipment

### Schritt 4:

Der Korb wird nun mit der Abdeckung an die vorgesehenen Haken unterhalb der Sitzfläche des Rollators eingehängt.

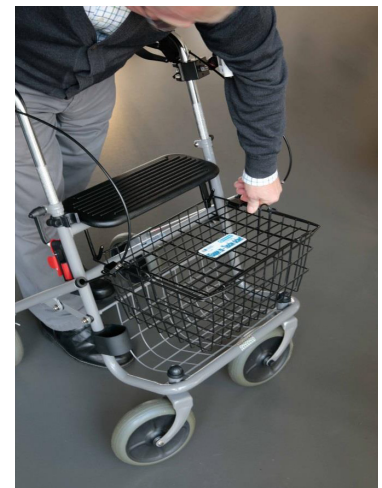


Anhängen des Korbes

### Schritt 5:

Öffnen lässt sich die Korb-Abdeckung durch die schwarzen Halterungen, welche nach außen geschoben werden müssen. Außerdem befinden sich diese unterhalb der Sitzfläche, sodass ein Öffnen der Abdeckung durch fremde Personen verhindert wird. Somit ist ein sicheres Verstauen von z.B. Handtaschen und Wertgegenständen gewährleistet.



Öffnen des Korbes

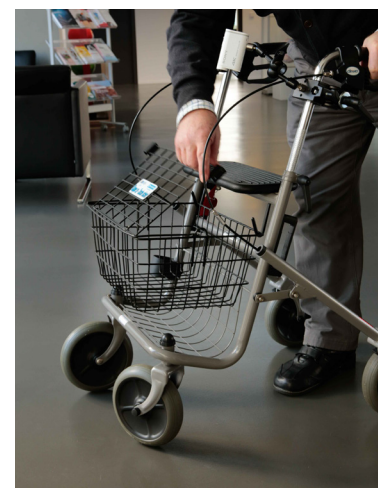

Schließen des Korbes